

**COME
SI
INDOSSANO
LE
MASCHERINE**



**COME
SI
TOLGONO
LE
MASCHERINE**



1
lava le mani con sapone
o soluzione alcolica



2
controlla che la mascherina
non sia rotta o bucata



3
distendi la mascherina
con la parte rigida in alto
e lato colorato all'esterno



4
tieni la mascherina per
gli elastici e agganciali
dietro le orecchie



5
Assicurati che la mascherina
copra naso, bocca e che aderisca
bene al viso e sotto il mento



6
sagoma bene il bordo
superiore lungo
il naso e le guance



1
lava le mani con sapone
o soluzione alcolica



2
evita di toccare la mascherina
che potrebbe essere infetta



3
tieni la mascherina per
gli elastici e sganciali
da dietro le orecchie



4
sanifica la mascherina
con una soluzione
alcolica se devi riutilizzarla



5
altrimenti getta la mascherina
nel cestino dei rifiuti
non disperderla nell'ambiente



6
lava le mani con sapone
o soluzione alcolica dopo
aver toccato la mascherina